

輔助溝通套裝 AAC Set

儀器簡介

為有溝通困難或同時有肢體控制困難的人士、其治療人員及家屬提供一套輔助溝通工具應用方案，可幫助有語言障礙的人士提升溝通及社交能力。套裝包括一個可於安卓平板電腦上免費下載的輔助溝通應用程式「溝通助手」，一個 USB OTG 轉接器，一個滑鼠按鍵轉換器及一個「迷你手指拍鍵」。為了令使用者及其家屬更了解使用方法，我們上載了使用教授短片。【<http://youtu.be/KDI07-TmZOs>】

訓練目標

協助有溝通困難或同時有肢體控制困難的人士，透過輔助溝通工具與其治療人員及家屬作溝通及社交之用途。

安裝

1. 首先把 USB OTG 轉換器連接平板電腦；
2. 將滑鼠按鍵轉換器跟 USB OTG 轉換器連接；
3. 再將「迷你手指拍鍵」連接於滑鼠按鍵轉換器左邊的插孔上；
4. 開啓「溝通助手」應用軟體；及
5. 選擇《自動模式》，再利用「迷你手指拍鍵」進行單鍵操作。

使用說明

1. 使用者可以透過「溝通助手」應用軟體中的設定模式調教《自動模式》時的速度；
2. 所使用的安卓平板電腦必須具有播音功能；及
3. 若需完全應用「溝通助手」應用軟體的其他相關支援功能，有關之安卓平板電腦必須配備 GPS 及 Wi-Fi 功能。

注意事項：

1. 「溝通助手」應用程式只限於安卓平板電腦下載使用，並不支援智能手機；
2. 不同品牌的安卓平板電腦有不同的 USB OTG 轉換器，建議先了解所使用的平板電腦是否支援 USB OTG 轉換器；及
3. 套件的相關報價不包括安卓平板電腦及「溝通助手」應用程式。



(迷你手指拍鍵)

(滑鼠按鍵轉換器)

(USB OTG 轉接器)