

改製滑鼠 Adapted Mouse

儀器簡介

有手部功能障礙的人士於使用電腦滑鼠時通常都會遇到一定的困難。而當中最困難的就是要以單手控制滑鼠移動，同時又要做出按動左右按鈕的動作。改製滑鼠是由一般滑鼠改裝而成，於滑鼠上加裝了左右按鈕插孔，讓使用者可以連接不同方式的輸入開關裝置 (圖一) 來控制滑鼠上左右按鈕的操作。由於左右按鈕與滑鼠分離，使用者現在可以利用雙手分別控制滑鼠的移動及單擊功能。



訓練目標

本產品沒有任何特定的訓練目標，主要是輔助手部功能障礙人士，透過不同輸入裝置進行點擊滑鼠左、右按鈕之動作。

安裝

本產品的安裝簡單，只要將產品的 USB 電腦線連接到相關的電腦上。然後再將選定的輸入裝置連接到代表滑鼠左鍵或右鍵的插頭即可。

使用說明

雖然改裝了的滑鼠多了兩個連接孔，但滑鼠原來的按鈕功能是不會受到影響的。



注意事項：

為了方便於滑鼠上加裝按鈕連接插孔，故會選用形狀比較大的滑鼠進行改裝。