

幻彩水柱 Aquatic Bubble Tube with Interactive Switches

儀器簡介

幻彩水柱主要是按照史露西倫多元感官刺激的理論提供視覺刺激給予有認知能力障礙的長者及智障人士，透過給予適當的感官刺激來協助有需要的人士提高對身邊環境的反應及改善情緒。幻彩水柱由 10 吋半方形木底座乘載，高 15 吋，水柱能產生水泡及有漸變色效果。水柱後面及底部裝有反映膠片鏡面提高水柱的視覺刺激。水柱亦有連接拍擊之插孔，以方便運用各種拍擊，達到互動訓練的效果。



訓練目標

著重提供視覺刺激，給予有認知或不恰當行為問題的長者或智障人士，令他們得到適當的感官刺激，誘發正常反應，從而滿足其本能需要。

安裝

1. 使用前先打開頂部之透明膠蓋，將水柱由底座內部抽出，打開水柱頂部的膠蓋並注入清水，要留意水位不可超越指定的位置；
2. 完成注入清水後將水柱放回底座內部並確定其安裝穩妥；及
3. 將火牛插頭插入水柱的連接頭上，最後把火牛接上電源，按開關掣開動水柱。

使用說明

1. 先選擇一處安靜舒適的地方，然後按以上的安裝程序完成有關幻彩水柱之安裝；
2. 預先計劃好使用幻彩水柱的目的，並設定使用的時間；及
3. 將使用者帶到有關的地方並按照預先計劃好的使用手法及時間來為使用者提供訓練。

注意事項：

1. 當為水柱注入水時要小心留意，避免弄濕連接電源連接位置；及
2. 使用後最好將水柱內之水倒出，避免儲水時間過長而引致水柱內滋生細菌，切勿蓄存水超過一星期。