

自動提示門鈴 Auto Voice Memo

儀器簡介

這是一個可以自動播放的錄音裝置，使用者可以自行灌錄有關之播放內容，之後只要每次有人行經此裝置附近時，裝置便會主動播出有關之錄音內容。此產品可以應用于長者平日之認知訓練及現實導向訓練中，亦可以協助有輕度記憶力衰退之長者，作為日常提示及行為治療之輔助器材。

訓練目標

協助有記憶力障礙的長者，作日常提示工具及用作認知能力訓練。



安裝

本器材沒有太多安裝步驟，只需要安裝電池，然後把裝置安放在門口或出入口位置。要注意把器材正面的感應器面向外面，才可發揮出自動感應及播放功能。

使用說明

1. 首先把側面的開關掣推到“REC”位置，然後面向器材正面的收音咪（MIC），再按著“REC/PLAY”按鈕，便可開始錄音；
2. 完成錄音後，把按鈕放開，然後再將側面的開關掣推到“PLAY”位置。再按下“REC/PLAY”按鈕，播放錄音；
3. 當確定所錄之內容正確後，將側面的開關掣推到“AUTO”位置，器材就可以自動感應播放所錄製的內容；及
4. 使用者可以透過器材背部設置的播放調校掣，將每次器材播放內容的時間分隔延長或縮短。

注意事項：

1. 由於本器材的耗電量比較大，每當器材的“LOW BATT”閃燈亮起時，表示器材電量下降，請盡快更換電池或使用交流變壓器。