工程及醫療義務工作協會

會址:九龍石硤尾村四十四座平台 207-212 室 電話:2776 8569 傳真:2788 1194 電郵:info@emv.org.hk

四柱棋 Catch Four

儀器簡介

此儀器主要訓練中風者上肢功能,棋子爲圓形木柱 30mm 直徑 x 80mm 長,分爲紅、黃及藍三種顏色,每種顏色各有四個棋子。長底座爲包木邊之木板(450mm 長 x 200mm 闊 x 20mm 厚),面爲米黃色防火膠板。三支可拆式不銹鋼圓柱高度爲 400mm。



訓練目標

此儀器主要爲訓練上肢活動幅度及協調能力而設。

安裝

將面板放在桌面上,然後將三支不銹鋼柱子旋緊於面板上,拿出棋子備用。

使用說明

- 1. 儀器使用者要將圓柱上串著的圓形木柱,由一邊傳送至另一圓柱;
- 2. 訓練者可以先把圓柱上三種不同色彩的木圓柱分散,串在不同的圓柱上,然後要求受訓者移動木柱,並達至每支圓柱上的木柱顏色均一樣;
- 3. 訓練者亦可先拾起預先放置在桌上的木柱,然後串入圓柱上;及
- 4. 導師或協助訓練者亦可以加減圓柱數目,由一支到三支,以調節訓練的難度。

注意事項:

- 1. 安裝者請謹記用士巴拿旋緊柱子在面板上。
- 2. 如有地方可供長期擺放,可以不將柱子拆下,固定在木板上。
- 3. 使用後請清潔,以保持衛生。