


筷子輔助器 Chopstick Adaptor

儀器簡介

使用筷子進餐，是對手部功能有一定要求之日常生活技能，特別是對於手部功能有障礙之長者及智障人士。「筷子輔助器」是一個使用簡易，但效果顯著的輔助器材。本器材可以靈活及簡易地安裝於一般市面上可以購買得到的筷子，能有效減少使用者使用筷子時所需要之手部力量及手指的靈活度，從而提高自理上的獨立性。

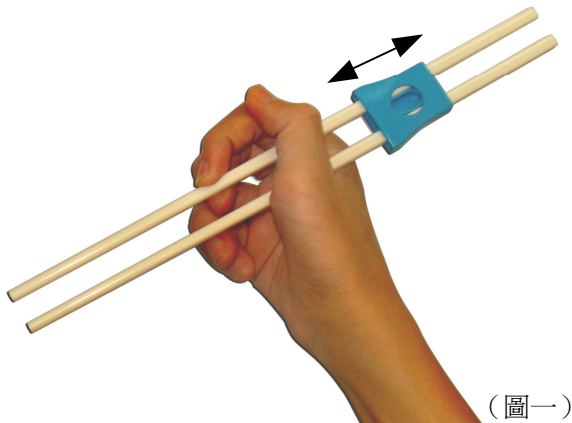


(圖一)

訓練目標

著重減低使用者手指動作上的負擔，改善操作筷子進食之手部活動能力，從而提高個人自理能力。

安裝

只要將筷子套入輔助器內之左右兩個小孔中（圖二），然後再按個別的手部情況調校輔助器之高度（圖一），從而調整筷子的開合度，以配合使用者之手部功能。

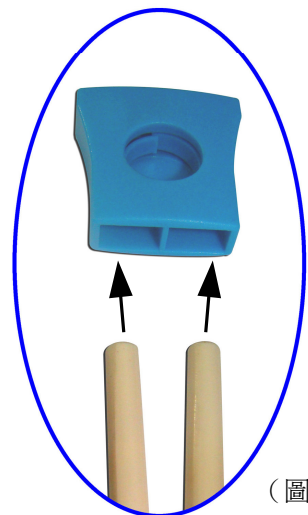

(圖二)

使用說明

本輔助器材可以直接於熱水中清洗。

注意事項：

1. 請勿將過粗的筷子插入輔助器中的小孔內，以免破壞輔助器中的內部結構；及
2. 請勿過度開展已經安裝於輔助器中的筷子，以免破壞輔助器本體。