

電子現實導向板 Electrical Reality Orientation Board



儀器簡介

一般患有腦退化症的人士都會接受現實導向治療訓練，目的是透過不斷重複提供實時的日期、時間、地點及人物等資料，加強患者的認知水平，從而減少精神和行為混亂的情況出現。當中治療師經常會借用現實導向板作為輔助工具來加強訓練效果，然而一般的現實導向板都需要準備大量資料咭，會做成遺失或其他使用上的不便，而電子現實導向板則提供一個方便的訓練選擇。

訓練目標

為患有腦退化症的人士提供現實導向訓練。

安裝

1. 電子現實導向板套件包括：
 - a) 電子現實導向板
 - b) 操作說明書
2. 電子現實導向板上方設有掛鉤，可以掛於牆壁上
3. 將電子現實導向板的電源接上，並將控制按鈕連接即完成安裝

使用說明

1. 首先固定好電子現實導向板；
2. 預先利用按鈕設定好合適的日期、時間等基本資料；
3. 詢問受訓者有關當時正確的日期、時間、天氣及節日等相關資料；
4. 如果受訓者的答案正確，則請受訓者按下控制鍵將正確的資料顯示出來；
5. 如果受訓者的答案不對，則給予提示並將正確的資料透過電子導向板顯示出來。