

## 特大起釘輔助器 Enlarge Staples Mover



### 儀器簡介


此器材專為上肢活動功能有障礙者而設，方便他們拆除書釘。輔助器的特色是加長了及加重了手柄，利用槓桿原理來減輕使用者所需要的力度。而頭部亦被磨尖及改為鈎狀，令使用者更容易把書釘拔起。另外，加大的底部，也令使用者更加容易使用。

### 訓練目標

讓上肢活動功能有障礙者學習拆除書釘。

### 安裝

本器材沒有太多安裝步驟，只需要於使用時將器材的底座放在紙上，然後把手柄的頭部插入書釘上，再把手柄按下令書釘從紙上起出來。

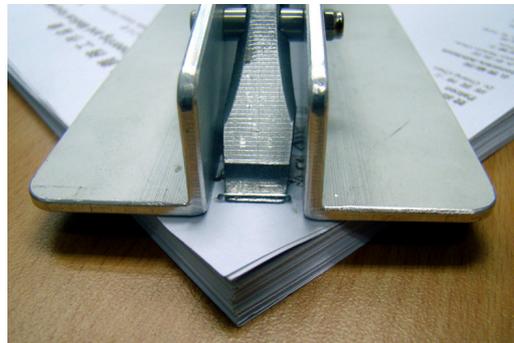

### 使用說明

1. 本器材對於打釘在比較厚的紙上的拆釘效果最為明顯，如果紙疊不太厚，建議使用一般釘書機的起釘器。
2. 要確定手柄尖峰完全插入書釘中，才按下手柄把書釘拔出。

### 注意事項：

1. 本器材設有活動關節部份，故要小心打開及摺合以免夾傷。
2. 本器材有尖銳的部份，故要小心受傷。