


加大手柄指甲鉗 Enlarged Handle Nail Cutter

儀器簡介

儀器適用於手指握力弱或關節炎患者作剪指甲用途。儀器包括一個加大手柄的指甲鉗和指甲銼，並固定於一塊膠座上，膠座底下有四粒防滑膠腳可作使用穩固之效，指甲鉗前端設有坑槽，用以承托手指於刀口前。

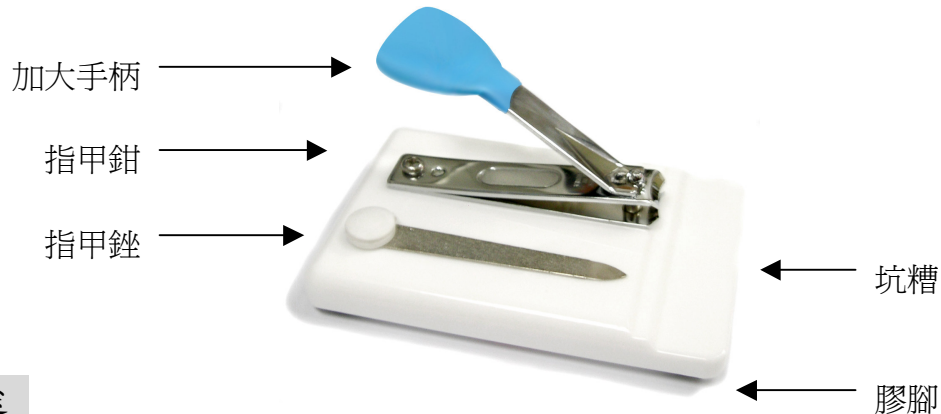

用途

1. 有助手指握力較弱患者可輕易地使用指甲鉗，進行剪指甲活動；
2. 防止關節炎患者過份用力緊握指甲鉗，而令手指關節變形。

安裝

指甲鉗各部份已經固定在膠座上，無需特別安裝。

使用說明

1. 將改裝指甲鉗放置在使用者的正前方穩固桌面上；
2. 把需要剪去的手指甲部份小心地放入指甲鉗的刀口位置，但切勿把指甲放得太深，以免剪甲時會傷及皮肉；
3. 以另一手掌/前臂/數隻手指同時按下手柄，便可剪去指甲，然後再放開手柄即可；
4. 調較手指甲擺放位置，直至剪去所有需要剪去的指甲部份為止；
5. 若指甲太硬，可用和暖水先浸 5-10 分鐘，軟化指甲，使修剪更容易和安全；及
6. 完成後將指甲放在指甲銼上前後移動，將凹凸不平的指甲修改得更圓滑。

注意事項：

1. 此輔助儀器含有鋒利邊緣，使用時雖要加倍注意安全；
2. 此儀器不適用於視力較弱或手眼協調能力較差的患者，以免將手指誤放在不適合位置而發生意外；
3. 請每次用完後請清潔刀口部份，其他部份也需定期清洗。清洗後需以乾布抹淨，以防止螺絲部份會有生銹情況發生；及
4. 切勿讓兒童或患有老年痴呆症的長者單獨使用，以免發生意外。