

指頭式超敏光暗開關 (連射版 / 普通版) Finger Size Hyper Sensitive Light Sensitive Switch (Continuous Version / Normal Version)



儀器簡介

本指頭式超敏光暗開關所需的力量水平較底，主要針對肢體控制有困難的人士而設，其體積只有一元硬幣的大小，可配合底部的魔術貼以固定儀器。開關器頂部的發光二極管設計，讓使用者只需輕微移動指頭，即可啟動開關器。本光暗開關器備有「連射版」及「普通版」可供選購。

安裝

1. 只需要把開關器底部固定好，然後再把連接線連接到訊號處理盒；
2. 把訊號處理盒連接到被控制的器材開關器上；
3. 最後把訊號處理盒的電源（包括電池或變壓器）連接上並開啟訊號處理盒即可。

使用說明

1. **連射版**：當指頭移動至能夠阻擋光源時，光暗開關即連續開啟，當光源回復時即關閉。
2. **普通版**：當指頭移動至能夠阻擋光源時，光暗開關即開啟一次，並隨即回復關閉狀態，直至光源再被阻擋才重新開啟一次。

