

閃燈拍掣 Flash Press Switch

儀器簡介

在閃燈拍掣的透明圓頂按板下，安裝了一排彩色的閃燈，當使用者按動拍掣時，閃燈便會閃動，加強了對使用者的視覺回饋（圖一）。拍掣的位置輕微傾斜，配合了人體手腕角度；按掣部份呈圓穹形，直徑為 3 吋，以配合大部分用家的手形並減低訓練引起的勞累；底部加裝有防滑墊設計，以防止使用時拍掣移位。另外亦備無線型號閃燈拍掣以供選擇，以配合不同使用者的需要。



（圖一）

安裝

1. 只要將連接線接駁至要控制的鍵盤或物件，然後設定閃燈拍掣上的開／關鍵，便可使用；
2. 無線型號：只要將“無線接收器及連接線”接駁至要控制的鍵盤或物件，再設定閃燈拍掣上的開／關鍵，便可使用。

注意事項：

1. 內有一個 9V 電池為閃燈供應電源，若閃燈沒有反應，可能是電源用盡，只要按指示打開內部，即可更換電池；
2. 無線型號閃燈拍掣以無線電波為傳達媒介，有效傳達範圍為約 10 呎內。