


摺合式鞋抽 Foldable Shoes Wearing Aid

儀器簡介

此器材專為中風者及上肢活動功能有障礙者而設，器材分為兩部份，主要部份為鞋抽，可協助他們穿鞋及除鞋之日常生活動作；另一面是不求人，可協助穿著下身衣物及騷癢背部。鞋抽本身以不銹鋼物料製造，十分堅固耐用，不易變形，其摺合式設計方便攜帶出外及收藏。鞋抽及不求人之大小及尺寸可以度身訂造。

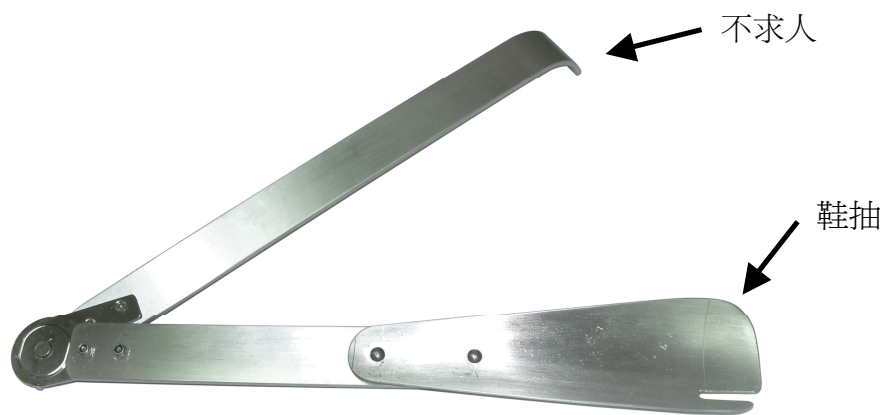

安裝

1. 在使用器材時，將器材兩邊向左右兩方拉開，直至中間之活動關節完全張開即可。



使用說明

1. 本器材分為兩部份，主要部份是鞋抽，另一部份是不求人。鞋抽的一面是用來協助穿著及除脫鞋子；至於不求人的一面則可協助穿著下身衣物及騷癢背部。
2. 在穿鞋時，先將鞋抽放入鞋筒內之鞋蹣位置，然後再把腳伸入鞋筒，直到腳趾完全進入鞋頭內，最後把腳蹣慢慢沿著鞋抽進入鞋筒，同時一面慢慢把鞋抽由鞋筒中抽出。
3. 在除鞋時，先將鞋抽從鞋蹣及腳蹣之間插入，然後再使力將鞋蹣部份透過鞋抽推出，最後再將前腳掌脫出鞋子。

注意事項：

1. 本器材設有活動關節部份，故要小心打開及摺合，以免夾傷。