


口腔運動訓練套件 Jaw Movement Training Aid

儀器簡介

本訓練套件針對顎骨關節活動幅度欠佳的人士作為訓練器材使用。由於使用時存在風險，強烈建議使用者需要於治療師指導下或經治療師評估後方可使用。本產品包括有本體及口腔片兩部分。使用者可以先將器材的口腔片部分放入口中，然後再按需要及能力，調校器材口腔片的擴張度數至合適的位置，最後就可以開始借助顎骨的咬合活動令器材的口腔片上下移動，從而改善顎骨關節的力量及活動幅度。器材有力度的調節功能，透過調校損杆，改變使用者顎骨與支點的角度，從而改變力度上的要求。

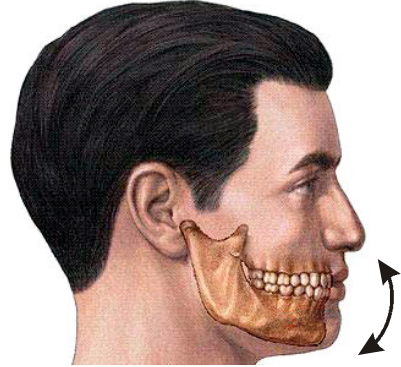

訓練目標

保持或改善顎骨關節的活動幅度及力量。

安裝

本產品涉及專業的調校及評估工作。建議使用者先向治療師諮詢有關器材的使用方法及接受訓練，方可自行安裝及使用。

使用說明

1. 先將口腔片的上顎及下顎部份，分別插入相關的插座上；
2. 再調校損杆的角度，從而調整出合適的力度要求；
3. 先利用口腔片開合調整裝置，將口腔片的開合度調整至緊合的狀況；
4. 將器材的口腔片部分放入口中，將口腔片的上下顎片放於上下顎牙齒之上；
5. 然後扭動口腔片開合調整裝置，將口腔片打開至特定水平，再指示使用者利用上下顎骨的咬合活動，訓練顎骨活動幅度及肌力。

注意事項：

1. 本器材設有活動關節部份，故要小心打開及摺合以免夾傷。
2. 本產品涉及與使用者身體有緊密接觸的部分，建議使用者只使用自己的器材。