

輕觸式拍掣 (分離版) Light Touch Switch (Separate Version)

儀器簡介

一般的拍掣都要求使用者按壓開關裝置來啟動，當使用者的手指力量不足以按壓拍掣時，就要利用其他身體部份去按壓拍掣。導電式輕觸按鈕原理類似現時智能手機上的輕觸式屏幕設計，利用人體的輕微導電特性作為開關裝置的媒介。使用者只需要輕輕觸碰導電金屬面板即可開關裝置。本產品的好處是使用者幾乎完全不需要負出額外的力量就可以啟動開關。本產品有多個不同版本，包括：電池版、變壓器版、超敏版、自動關閉版、連動版、藍芽版、分離版本等等。



訓練目標

本產品主要協助手指力量不足人士開關儀器。

安裝

本產品有兩個主要部份。1. 感應板 2. 電能盒。只要把電能盒放入電池或接上火牛，然後把感應板一端連接到電能盒上，再把電能盒另一端與所需要控制開關的裝置（如：USB 按鍵輸入器）連接好。最後開啟電能盒開關即可。



使用說明

1. 當正確地連接上拍掣時，每當使用者觸摸到感應板時，都會由電能盒內發出“達”的一聲，顯示出成功開啟拍掣。
2. 如果導師發現感應板的敏感度不理想，可以聯絡本會作出調節。
3. 如果拍掣為連續版本，每當使用者接觸感應板時，即可作出連續開啟和關閉的指令，直到使用者的手指離開為止。

注意事項：

1. 因各人電阻及導電能力均有不同，所以本產品需要作出調校以達到最佳效果。
2. 由於連接線的長度亦會影響感應板的反應，故切勿自行更換有關之連接線。