

輕觸式拍掣系列


(電池版/變壓器版/超敏版/自動關閉版/連動版/藍芽版/分離版)

Light Touch Switch Series

(Battery Version / Converter Version / Sensitive Version / Auto-off Version / Continuous Version / Blue tooth Version / Separate Version)

儀器簡介

一般拍掣都要使用者按壓開關裝置來啟動，當使用者的手指力量不足以按壓下拍掣時，就需使用其他身體部位去按下拍掣。本導電式輕觸式拍掣，原理類似現時智能手機上的輕觸式屏幕設計，利用人體的輕微導電特性作為開關裝置的媒介，使用者只需輕輕觸碰導電金屬平面即可開關裝置。本產品的好處是使用者幾乎完全不需要額外力量就可啟動開關。本產品備有多個不同版本可供選擇，歡迎聯絡本會職業治療師查詢。

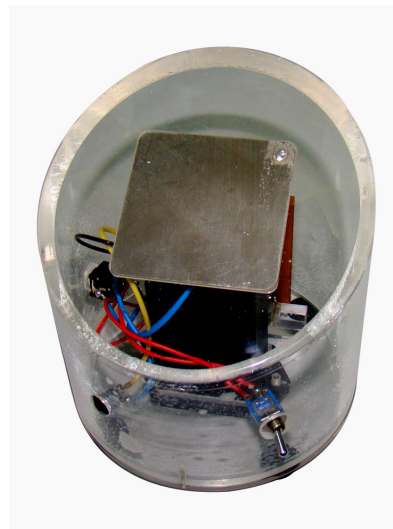

安裝

電 池 版：只要安裝上電池，再與所需要控制開關的裝置連接即可。

變壓器版：只要把變壓器連接上，再與需要控制開關的裝置連接即可。

超 敏 版：感應器的敏感度被調高，但同時亦比較易出現誤判現象。

自動關閉版：即使使用者的手仍然放在感應器上，拍掣仍會由內置程式自動關閉開關訊號。

連 動 版：當使用者的手仍然放在感應器上，拍掣仍會由內置程式不斷發出開啟訊號，直到使用者的手離開感應器為止。

藍 芽 版：拍掣與所控制的裝置可以進行藍芽配對無線連接。

分 離 版：本產品有兩個部份。1.為感應板；2.為電能盒。只要把電能盒裝上電池或接上火牛，然後把感應板連接到電能盒上，再把電能盒另一端與所需控制開關的裝置連接好，最後開啟電能盒的電源開關即可。

使用說明

1. 當正確地連接上拍掣時，每當使用者觸摸到感應板時都會發出“達”的一聲，顯示出成功開啟拍掣。
2. 如果治療師發現感應板的敏感度不理想，可以聯絡本會作出調節。

注意事項：

1. 由於電阻及導電能力人人有所不同，所以本產品可能需要本會的工程人員作出調校以達到最佳效果。
2. 由於連接線的長度亦會對感應板的反應有所影響，故切勿自行更換有關之連接線。