工程及醫療義務工作協會

會址:九龍石硤尾村四十四座平台 207-212 室 電話: 2776 8569 傳真: 2788 1194 電郵: info@emv.org.hk

幻彩沙池 Magic Sand Tray



儀器簡介

幻彩沙池是按照「史露西倫」多元感官刺激的理論,提供視覺及觸覺刺激予有認知能力障礙的長者及智障人士,透過適當的感官刺激,協助有需要的人士提高對身邊環境的反應及改善情緒。


幻彩沙池由長方形底座組成,沙池底部裝有能產生漸變色彩燈光之發光原件,上面可盛載沙粒。幻彩沙池之大小尺寸,可因應使用者的需要訂造。

訓練目標

透過提供視覺及觸覺刺激,讓有認知或行為問題的長者或智障人士,為他們提供適當的感官刺激,以提升其感知及觸覺能力。

安裝

- 1. 本產品共分兩個部份,包括發光 底座及透光沙池;
 - (註:沙粒需自行購買)
- 2. 先把沙池平放在發光底座上面;
- 3. 然後將沙粒倒入透光沙池;
- 4. 最後把電源線接上,即可使用。

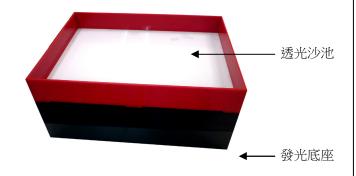

使用說明

- 1. 先選擇一處安靜舒適的地方,然後按以上安裝程序完成安裝;
- 2. 預先計劃使用幻彩沙池的目的,並設定使用時間;
- 3. 讓使用者面向沙池,並按預先計劃的使用目標及預定時間,為使用者提供訓練。

注意事項:

1. 留意發光底座旁邊設有散熱風扇,使用時請勿阻礙,以免底座過熱引至短路。