

浮動座廁腳踏 Mobile Toilet Footrest

儀器簡介

一般的座廁高度對於某些有特殊需要的使用者來說可能太高，使得他們可能很難上落座廁或於使用時雙腳不能踏在地面上，以致長時間坐著做成毛病。可是一般的座廁改裝只可以加高，而並不能隨便改低。浮動腳踏的製作，正好解決了座廁高度引起的問題。



腳踏的大小能配合一般中心或家庭的座廁而設計，踏級可給予一個中等亞洲成人雙腳同時平放在踏級上面。踏級由塑料製作，具備防水防銹防霉等功能。踏級設有安全帶，用來固定踏級與座廁之間的位置。為了方便清潔及運輸，踏級設有運輸小輪。

訓練目標

協助有特殊需要的使用者，安全地使用座廁。

安裝

先把踏級的安全帶扣鬆開，然後把安全帶扣在座廁後面即可，最後把安全帶套緊就完成。

使用說明

本產品可以用水沖洗，但於完成清潔後，建議把踏級底部吹乾，令踏級更耐用。



注意事項：

1. 本踏級的重量較重，於搬運或清潔時要留意身體的姿勢，避免勞損。
2. 本踏級設有彈簧小輪，當沒有人踏上踏級時，彈簧小輪會升起整個踏級，方便運輸，但當有人踏上踏級時，踏級便會下降，能穩固地抓實地面，以保安全。