


滑鼠按鍵轉換器 Mouse Adapted Interface

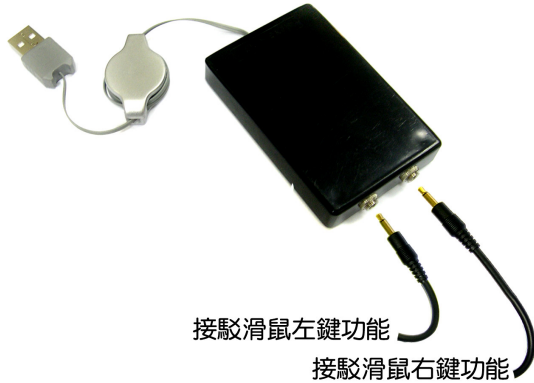

儀器簡介

有手部功能障礙的人士於使用電腦滑鼠時通常都會遇到一定的困難。而當中最困難的就是要以單手控制滑鼠移動，同時又要做出按動左右按鈕的動作。滑鼠按鍵轉換器將滑鼠的左右按鈕功能抽出，並裝設於一個盒子中。轉換器設有左、右按鈕的连接孔，使

用者可按需要連接不同的輸入開關裝置 (圖一)，以應用滑鼠左、右按鈕的功能。雖然沒有了滑鼠指標的功能，但有利於配合其他滑鼠指標控制裝置使用，亦不須改裝原有的電腦滑鼠。

訓練目標

本產品沒有任何特定的訓練目標，主要是輔助手部功能障礙人士，透過不同輸入裝置進行點擊滑鼠左、右按鈕之動作。

安裝

本產品的安裝很簡單，只要將產品的 USB 電腦線連接到相關的電腦上。然後再將選定的輸入裝置連接到代表滑鼠左鍵或右鍵的插頭即可。

使用說明

滑鼠按鍵轉換器是沒有滑鼠指標功能的，如果有需要請自備另一電腦滑鼠以控制鼠標。



(圖一) 另購輸入開關裝置介紹

注意事項：

USB 電腦線附有伸縮功能，請輕力拉扯，以免損壞伸縮功能。