


剪紙引導器 Paper Cutting Guide

儀器簡介

此儀器讓弱視或小肌肉協調較差的弱能人士，在安全的情況下，學習運用剪刀。儀器由兩件透明膠片組成，由一活動鉸及磁力鎖聯繫一起，中間有一引導坑槽（圖一）。儀器的大小及坑槽的路線（直線、斜線或小弧線），一般可按用家的需要設計，以配合弱能人士在日常訓練或工作上的需要。

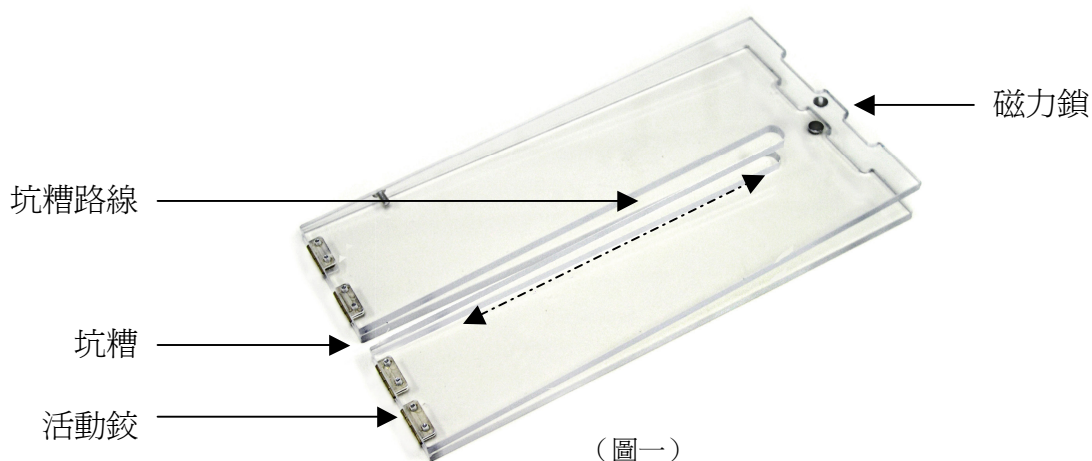

訓練目標

1. 引導學員學習使用剪刀，透過剪紙的動作，訓練他們的視覺感知及小肌肉耐力與協調；及
2. 透過儀器輔助和適當訓練，增強學員運用剪刀的技巧，以配合工作上的需要。

安裝

無需任何安裝。

使用說明

1. 先把剪紙引導器的透明膠片打開，放入紙張並沿膠片對齊；
2. 合緊透明膠片並確定磁力鎖位置關上；及
3. 受訓學員可沿著坑槽，剪出要求的線條（圖二）。



注意事項：

1. 導師須按每位學員的能力作出適當的訓練；及
2. 導師亦應衡量個別學員的能力，以決定是否讓學員單獨使用此儀器，免生意外。