

便攜式現實導向板 Portable Reality Orientation Board

儀器簡介



【導向板上之資料可由用者自訂。】

一般患有腦退化症的人士都會接受現實導向治療訓練，目的是透過不斷重複提供一些實時的日期、時間、地點及人物等資料，加強患者的認知水平及減少精神及行為混亂的情況出現。當中治療師經常會借用現實導向板，作為輔助工具來加強訓練效果。然而，一般的現實導向板都比較大型、流動性不高，做成使用上的不便。便攜式設計，提供了一個可以掛起，亦同時便於移動的現實導向板。

訓練目標

現實導向板能提供實時的日期、天氣、節日等訓練，給予患有腦退化症的人士。

安裝

1. 便攜式現實導向板套件包括：
 - a) 現實導向板
 - b) 現實導向資料插咭
2. 現實導向板上方設有鉤，可以掛於牆壁上
3. 現實導向板背部設有腳架，下方裝有滑輪，便於運送導向板及固定導向板，以便進行訓練。



使用說明

1. 首先固定好導向板；
2. 預先選擇出正確的現實導向資料咭；
3. 詢問受訓者有關當時正確的日期、天氣及節日等相關資料；
4. 如果受訓者的答案正確，把正確的資料咭給予受訓者插入正確的方格中；
5. 如果受訓者的答案不對，則給予提示，並將正確的資料咭給予受訓者，然後插入正確的方格中。

注意事項：

由於現實導向板的體積比較大，當運輸時可能出現不穩定的情況，故建議最少以二人同時合作運輸。