


聲音感應開關控制器 Sound and Silence Switch

儀器簡介

「聲音感應開關控制器」是一件專為四肢不能活動或活動能力較弱的人士而設計的產品，好讓他們能透過控制器，利用聲音控制電子產品的開關。全套儀器包括感應聲音的控制盒、一支收音咪及一條連接線（圖一）。

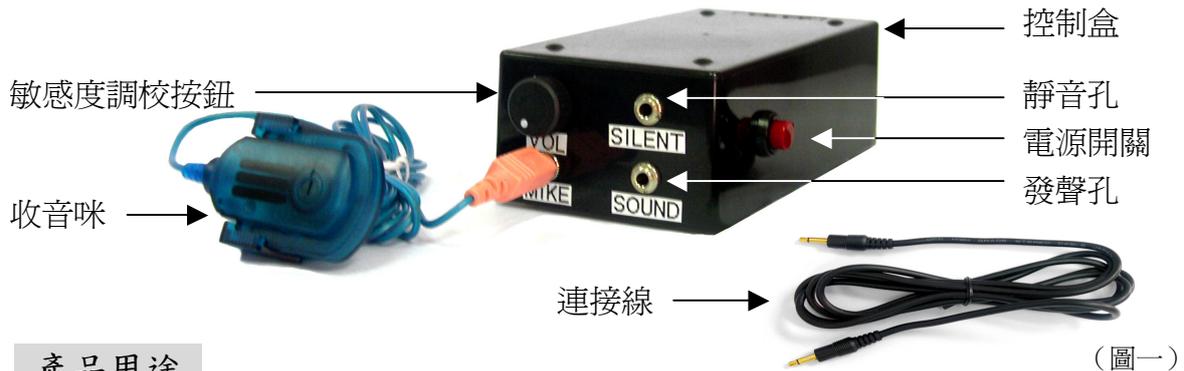

產品用途

1. 作為輔助器具：讓使用者能透過控制器，利用聲音控制電子產品的開關；
2. 作為訓練器具：將電動的刺激物(如玩具)接駁至器制器的發聲模式，以利用聲音啓動刺激物，能鼓勵使用者發聲；而將電動的刺激物接駁至器制器的靜音模式，則能鼓勵使用者保持寧靜。

安裝

1. 儀器上有三個插孔，收音咪插孔(MIKE)和兩個以接駁電子產品之插孔，分別為：
 - i. 發聲孔 (SOUND)：用者需要發聲才可啓動開關；
 - ii. 靜音孔 (SILENT)：要求用者不發聲，保持寧靜，才可啓動開關（圖一）。
2. 把連接線插於相應的孔內，用以選擇“發聲”或“靜音”模式，再將連接線的另一端插於要控制的電子產品上，便能開關該產品，注意發聲及靜音孔不能同時接駁；
3. 一個 9V 電池置在控制器背面的電池盒內(圖二)。



使用說明

1. 把收音咪插上儀器，收音咪最好放置於距離發聲源約 15 厘米。留意收音咪與用者的距離，可直接影響其敏感度；
2. 利用按鈕去調校接收聲音的敏感度；向順時針方向轉，令儀器較為敏感，細聲也可以激活單擊鍵；向逆時針方向則可收緊其敏感度。

注意事項：

1. 用者需要有適當的訓練，才能適應本儀器的敏感度，把操控做到最穩定。