

吸盤扶手 Sucking Handle

儀器簡介

這是一個給患有痙攣的人士用來穩定上肢的裝置。扶手本身由一個強力吸盤構成，吸盤上方設有吸盤開關掣，可以作放開及鎖緊吸盤之用。本產品所使用之吸盤吸力強大，而且吸盤本身結構堅固，當安裝完成後扶手相當穩固，不易移位或脫落。吸盤裝置取代傳統的繫穩設計，有助提高扶手的流動性，方便治療師及照顧者用來穩定使用者不同的手部形態。



訓練目標

本儀器的主要作用在於穩定使用者的上肢部分，讓他們可以更加容易控制身體其他部分進行活動或執行工作。

安裝

使用儀器時，先選擇好手部放置於檯面板上的合適位置，然後把扶手吸盤的位置放好，再將吸盤開關掣鎖緊。當確定扶手已經安裝穩固後，再利用拳頭扎帶，將手掌握著手柄的位置固定在扶手柄上。當要移除本儀器時，先把拳頭扎帶移走，然後再把吸盤開關掣鬆開，以移走扶手。



使用說明

本器材之吸盤只適用於平滑的固定平面上，使用前請先確定檯面表面平滑乾淨以及表面沒有任何不穩定的結構例如紙張，裝飾，油漆等，以免影響吸盤的功能。

注意事項：

1. 由於本器材重量比較重，當使用時請小心，以免撞落地下或撞倒其他設施或人體，做成傷害。
2. 使用者必須確定吸盤已經穩妥地安裝於平滑表面上，如有懷疑請重新安裝吸盤。
3. 請定期檢查吸盤的情況，如果發現有破損或硬化現象出現，請立即停止使用，並通知本會作檢查及維修。