

座枱剪刀輔助器 Tabletop Scissoring Aid

儀器簡介

此器材專供手部或上肢功能欠佳的人士使用。當中的剪刀加入回彈功能，手柄亦經過特別設計，可以在無須緊握手柄的情況下運用剪刀。剪刀安裝在木製檯座上，可以增加使用時的穩定性。附設有刀鋒保護套，防止意外弄傷手指。本器材亦適合單手操作。

訓練目標


協助上肢功能欠佳者使用剪刀。

安裝

小心將刀鋒保護套移除，並放置在穩固的桌面上使用即可。

使用說明

1. 先把刀鋒保護套除下，露出剪刀。
2. 把紙品放於剪刀刀鋒之間並對好位置，然後將手從紙品移開。
3. 確定紙品的位置合適及手部移開到安全位置後，便可以按下手柄，剪開紙品。
4. 當手從剪刀手柄移開，剪刀手柄會自動回到原來打開的位置，然後將紙品從剪刀中移出。
5. 當使用完成後，記緊把刀鋒保護套裝回原來的位置保護刀鋒，以免發生意外。

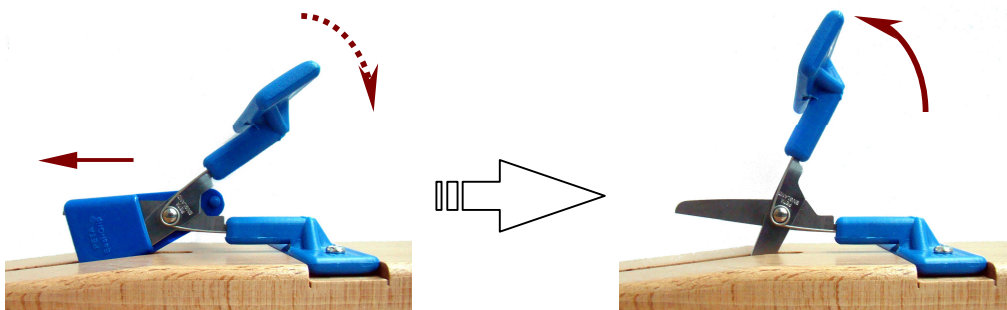

注意事項：

1. 本器材設有活動關節部份，故要小心打開及摺合，以免夾傷。
2. 本器材比較重，建議盡量避免靠近桌邊使用。