


開關水龍頭訓練器 Tap Turning Training Aid

儀器簡介

此器材是把普遍使用之水龍頭改裝作訓練之用，器材接上了一些電子裝置，當開關「水龍頭」時，器材會有紅綠閃燈及發出聲響，作為成功開啓或關閉水龍頭的回饋。(圖一)

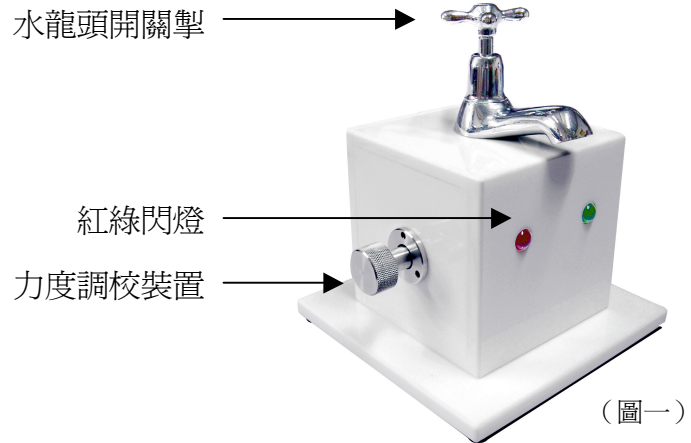

訓練目標


1. 透過使用真實的開關水龍頭，模擬出日常生活中開關水龍頭之手部動作，以訓練使用者開關水龍頭；及
2. 治療師可以利用訓練器旁之力度調校裝置，因應個別人士之特殊情況，調校所需要之手部力量，以訓練使用者的手部開關力量。

安裝

鬆開訓練器背面的電池箱蓋螺絲，放入四枚 AA 電池，然後蓋回電池箱，並收緊螺絲，便可使用。(圖二)

使用說明

1. 先把開關水龍頭訓練器安放於平穩桌面上；
2. 然後使用力度調校裝置，設定合適之訓練力度；及
3. 再開動訓練器之開關掣便可進行訓練。

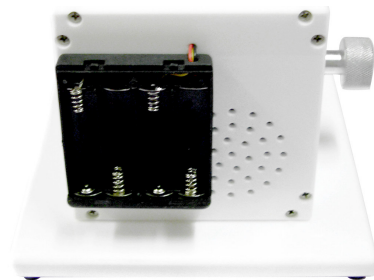

注意事項：

1. 由於開關水龍頭訓練器體積比較大，重量較為重，當安放於桌面上使用時務必要小心，以防撞倒手肘或碰跌落地面，造成傷害；
2. 由於可透過訓練器旁之力度調校裝置調校不同力度，建議使用前先諮詢職業治療師之意見，才作出合適之調校，以免因力度要求過大而造成傷害；
3. 訓練後，如有一段時間不使用此儀器，請先將電池取出，以防因電池放置太久而令電池損耗或漏電；及
4. 訓練器上的電子裝置如不能運作，可先檢查電池是否安裝妥當或電池是否已耗盡。若仍不能開啓，可聯絡本會維修。