工程及醫療義務工作協會

會址:九龍石硤尾村四十四座平台 207-212 室 電話:2776 8569 傳真:2788 1194 電郵:info@emv.org.hk

超薄按掣 Thin Switch

儀器簡介

這是一個適合手部 功能困難人士使用 的輸入裝置,可用作 爲一個開關掣。使用 者可拍按此掣來操 整 單 按 式 電 腦 裝 費 數 改裝玩具及改裝 復康儀器。此按掣特



點是有特大的圓形掣面(100mm 直徑),外型輕巧超薄(8mm 高度),靈敏度高,只需輕輕觸動任何一處按掣面即可啟動開關,按掣時也能提供輕微觸覺反饋的信息,按掣有多種顏色可供選擇及按掣底部加上防滑膠,讓按掣能夠穩固在桌面上,方便使用。

訓練目標

用作著重訓練使用者手部功能,例如:手掌拍按、手指點擊及手臂伸展等。

安裝

安裝簡單及容易,只需將超薄按掣的插頭直接插入改裝儀器即可。

使用說明

- 1. 將超薄按掣擺放於使用者的正前方桌面上;
- 2. 使用者只需用手掌拍按或使用手指輕輕觸動掣面,即可控制開關;及
- 3. 訓練升級:先將超薄按掣擺放於距離使用者較近的位置,然後逐步要求使用者 將手臂向前伸出及拍按距離較遠的按掣。

注意事項:

- 1. 切勿讓兒童、弱智人士或患有老年痴呆症的長者單獨使用,以免玩弄電線而發生 危險;及
- 2. 切勿用硬物撞擊按掣或拉扯電線,以免毀壞按掣。