

USB 按鍵輸入器 USB Switch Mate

儀器簡介



「USB 按鍵輸入器」為隨插即用設計，主要是把電腦鍵盤上之個別按鍵組合預先設定在輸入器的接駁插座，讓用者簡易接駁不同操作模式的輸入開關裝置。透過接駁較簡單及容易操作的輸入開關裝置，如：手掌拍擊或輕觸按鈕開關掣等，讓智力或手部功能較差的人士使用電腦，包括使用電腦遊戲、學習及進行其他電腦復康訓練。全套儀器包括：按鍵輸入器和 USB 連接線。

儀器用途

為智力或手部功能較差的人士提供多一種操作電腦的途徑，進行遊戲、學習及其他電腦復康訓練等活動。


安裝

1. 先將「方型」USB 插頭連接到按鍵輸入器；
2. 再將另一 USB 插頭接駁至電腦，便可看到「紅色」連接指示燈亮著；
3. 待約十秒，可於電腦的【控制台】>【系統】>【硬件】>【裝置管理員】看到新加了「ID Keyboard Device」的設備（圖一）；
4. 接駁最多四個所需的輸入開關裝置到按鍵輸入器插座，便完成安裝。

【備註：儀器必須配合各種輸入開關裝置使用。（圖二）】



（圖一）安裝成功後，新加的项目（見紅圈）

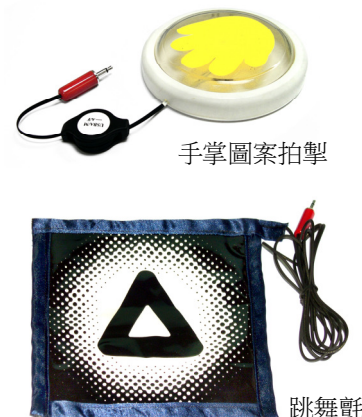

（圖二）另購輸入開關裝置介紹

使用說明

「USB 按鍵輸入器」已預設四組不同功能的按鍵組合，只須按一次「組別設換鍵」，便能設換一組按鍵組合，這組別的按鍵分別對應四個插座供開關掣作按鍵輸入的用途，而「綠色」組別指示燈會指示設換到哪組按鍵。導師可因應訓練目的或電腦軟件的需要，選擇合適的按鍵組合讓用者使用。

四組按鍵組合
分別為：

	插座一	插座二	插座三	插座四
第一組	A	B	C	D
第二組	1	2	3	4
第三組	↑	↓	←	→
第四組	SPACE	ENTER	Y	N

第一組別指示燈亮。



按一次設換鍵，第二組別指示燈亮。



再按一次設換鍵，第三組別指示燈亮。



再按一次設換鍵，第四組別指示燈亮組。



注意事項：

1. 導師須了解使用者的活動能力，選擇合適的輸入開關裝置以配合本儀器使用；
2. 在使用多個輸入開關裝置時，要注意電線的接駁和擺放，以免被電線絆倒。