

網絡版自動錄音提示器 Voice Recording Memo (Wi-Fi Version)

儀器簡介

這是自動錄音提示器的網絡版本，使用者可自行灌錄需要之播放內容，讓每次有人行經有關裝置附近時，裝置便自動播出有關之錄音內容。而網絡版本更加入了網絡控制及監測功能，照顧者可以透過網絡控制一共八個錄音內容的播放。此外，如果在預設時間內沒有人走過器材，器材便會自動發出警告，再網絡發報提示照顧者。



而透過加裝電子定時開關裝置，可為器材設定特定的開動時間，以減少不必要之干擾及節約用電。本器材前面設有插咭位置，方便照顧者插上合適的提示圖咭配合錄音內容。網絡版自動錄音提示器套裝包括無線提示器，網絡路由器及可編程電插座一個。

訓練目標

本器材可以應用於提示長者日常生活事項：例如吃藥，覆診，等送飯，注意天氣轉變等事宜上的處理；亦可以作為日常長者之認知訓練及現實導向訓練，更可作為行為治療之輔助器材。

安裝

A. 網絡部分：

1. 網絡設定將由本會工程師上門協助進行。(只限本港地區)

B. 儀器部分：

1. 首先決定無線提示器安放的位置，最常見的位置有大門口、房門口、廁所門口或廚房門口附近的位置；
2. 安放無線提示器時，需要留意儀器正面的感應器，最好安放在面向有人活動的方向；
3. 如要錄製播放內容，首先將無線提示器的電插頭插入附近的插座上，再開著儀器，待聽到了“必”一聲之後，再使用「網絡控制頁面」選擇好錄音位置(1-8)，就可以按著儀器錄音掣，並向著儀器正面的收音器，講出要錄製的內容。錄音時間最長約2分鐘，當完成錄音後鬆開錄音掣即可停止；

4. 當完成錄音後，儀器需要大約 1 分鐘時間啓動動態感應器，之後當探測到有人走過器材前，即會播出錄音；
5. 如果要使用電子定時開關裝置，請先把儀器的電插頭接上電子定時開關裝置，再將電子定時開關裝置插入附近的插座上。再按電子定時開關裝置的說明書指示，設定電子定時開關裝置即可；及
6. 要留意當需要再次進行錄音時，電子定時開關裝置有可能會影響器材不能進行錄音程序，請將儀器的電插頭，直接插入附近的電插座並進行錄音程序即可。

C. 網絡控制頁面：

1. 照顧者只需要透過電腦或手機上網，利用網頁瀏覽器輸入相關網址，即可連結網絡控制頁面進行控制；
2. 網絡控制頁面上會出現長者或使用名稱、儀器安裝地點、即時播放按鈕及八個錄音內容選擇按鈕；
3. 照顧者如要更改播放的錄音，只需點選其中一個錄音，在家中的儀器就會即時進行更新，當下次有人走過儀器時，就會播放已更新的內容；
4. 照顧者亦可以按下播放按鈕，令儀器即時播放更新了的錄音；及
5. 如果過了預設時間後，仍然沒人走過器材，網絡控制頁面上會出現一個警告字句，提示照顧者。

使用說明

1. 八個提示錄音內容可以自由錄製，但內容不會在控制網頁上播出，照顧者要自行記錄所錄製內容的位置。
2. 使用示範視頻：<http://youtu.be/WqiStcUWmvQ>

注意事項：

1. 使用者的家居必須具備家居網絡服務。
2. 使用者必須使用套裝內包含的無線網絡由路器，並同意由本會工程師負責安裝相關網絡。
3. 照顧者如利用流動上網服務進入頁面，要留意相關數據使用量及所需費用，相關頁面功能速度及反應會因為流動上網服務計劃而有所影響，本套件不包括流動上網服務及家居網絡服務的一切相關費用。