

自動錄音提示器 Voice Recording Memo

儀器簡介

這是一個可以自動播放的錄音儀器，使用者可以自行灌錄有關之播放內容，然後只要每次有人行經儀器附近時，儀器就會主動播出有關之錄音內容。此產品可以應用於長者平日之認知訓練及現實導向訓練中，亦可以協助有輕度記憶力衰退之長者作為日常提示或行為治療之輔助器材之一。本儀器提供電芯版本及交流電版本，讓使用者選購。使用交流電的版本可以透過加裝電子定時開關裝置為器材設定特定的開動時間，以減少不必要之干擾。本儀器前面設有插咭位置，方便照顧者插上提示圖咭。



訓練目標

本器材可以應用於日常長者之認知訓練及現實導向訓練中，亦可用作行為治療之輔助器材。

安裝

A. 電芯版本：

1. 首先決定儀器安放的位置，最常見的位置有大門口、房門口、廁所門口及廚房門口附近的位置。
2. 安放儀器時，要留意儀器正面的感應器最好面向有人途經的方向。
3. 錄製播放內容，將為儀器安裝電池，再開著儀器，聽到了“呖”一聲之後，就可以按著錄音掣並向著儀器前面的收音器講出要錄製的內容。錄音時間最長 2 分鐘。最後當完成錄音後鬆開錄音掣即可停止。
4. 當完成錄音後，儀器需要大約一分鐘時間啓動動態感應器，之後每當探測到有人走過儀器前面，即會播出錄音。
5. 當電池電力不足時，儀器中的電池顯示燈會亮起，表示電池效能不足需要更換。

B. 交流電版本：

1. 首先決定儀器安放的位置，最常見的位置有大門口、房門口、廁所門口及廚房門口附近的位置；
2. 安放儀器時，要留意儀器正面的感應器最好面向有人途經的方向。
3. 錄製播放內容，將儀器的電插頭插入附近的電源插座上，再開著儀器，聽到了“呖”一聲之後，就可以按著錄音掣並向著儀器前面的收音器講出要錄製的內容。錄音時間最長 2 分鐘。最後當完成錄音後鬆開錄音掣即可停止。
4. 當完成錄音後，儀器需要大約一分鐘時間啓動動態感應器，之後每當探測到有人走過儀器前面，即會播出錄音。
5. 如果要使用電子定時開關裝置，只要把器材的電插頭插入電子定時開關裝置，再將電子定時開關裝置插入附近的電源插座上。再按說明書指示設定電子定時開關裝置即可。
6. 當需要再次進行錄音時，要留意電子定時開關裝置有可能會影響器材不能進行錄音程序，此時請將儀器的電插頭直接插入附近的電源插座，並進行錄音程序。

使用說明

自動播放的錄音可為以下資訊：

1. 提醒長者出門前要配戴鎖匙，關掉燈火，鎖好門窗等。
2. 提醒長者覆診日期，短期要注意的事項。
3. 提醒長者當天的年月日及地點等導向訊息。
4. 可於長者家居設置多個儀器，以達致一系列的提示功效。

注意事項：

1. 由於電池電量未能永久保持穩定，所以當電池電力下降時，有機會出現誤鳴的情況，但在使用交流電的版本上，則不會出現上述情況。
2. 交流電的版本須接上電源，故放置儀器的位置附近需有電源插座，購買時需注意此點。