


浴室煤氣爐開關輔助器 Water Heater Starter

儀器簡介

此儀器主要用作輔助開關煤氣熱水爐掣，適合一些患有關節炎或缺乏手指力的人士於開關煤氣爐掣時使用。儀器由一支加粗的防滑膠手柄和一個可調教大小的鋼圈所組成（如圖一）。

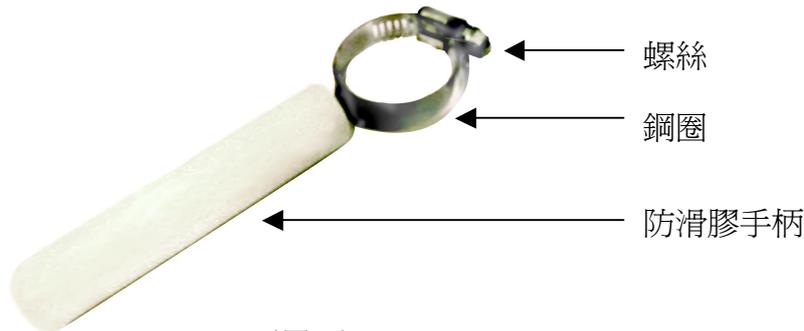

（圖一）

產品用途

適合一般關節炎病患者、手握力弱及手部關節活動有限制的人士使用。

安裝

1. 將鋼圈套在熱水爐開關掣上；
2. 用螺絲批調緊鋼圈旁的螺絲，以固定在熱水爐之開關掣上（如圖二）；
3. 有需要時，使用者可由他人協助安裝。

使用說明

1. 儀器安裝後，使用者可持著膠手柄然後轉動至煤氣爐開爐位置；
2. 如要關閉煤氣爐可持著膠手柄向反方向轉動；
3. 不使用時，可將儀器留於開關掣上而無需拆下；及
4. 定期清潔儀器。



（圖二）

注意事項：

1. 儀器如有損毀，例如：生銹或膠柄爆裂等，應要立即停用及維修。本會可以提供維修服務。