工程及醫療義務工作協會

會址: 九龍石硤尾村四十四座平台 207-212 室 電話: 2776 8569 傳真: 2788 1194 電郵: info@emv.org.hk

迷你手指拍鍵 Ver. 2 Finger Button Switch Ver.2

儀器簡介

本拍鍵主要為肢體控制有困難的人士而設計。其體積只有一個硬幣的大小,再配合底部的魔術貼,方便固定於任何地方。本拍鍵內部的特殊開關器設計,即使使用者只能按下拍鍵的邊緣部份,拍鍵亦可以被開啟,當中所牽涉的力量水平亦比較少,讓體能較弱的使用者亦可使用。



安裝

只需要把拍鍵底部固定好,然後再把連接線連接妥當即可使用。

使用說明

當按下拍鍵時即開啟,放開拍鍵時即關閉。

注意事項:

1. 拍鍵以金屬材料製作,故有一定重量。因此須小心固定好,避免 用跌落,損壞拍鍵及弄傷使用者。