

## 搖桿滑鼠 Joystick Mouse

### 儀器簡介

本搖桿滑鼠主要為手部控制有困難的人士而設計的滑鼠裝置。其體積比一般的滑鼠大。黑色搖桿部份可以用來控制浮標的位置。



### 安裝

只需要把搖桿滑鼠放好，然後再把連接線連接妥當即可使用，連接線一邊 USB 頭接駁電腦 USB 埠，另一邊 micro-USB 頭接駁搖桿滑鼠。

### 使用說明

1. 完成接駁後，按右邊紅色的開關掣，開啟搖桿滑鼠，而上面的綠色燈會亮起，表示可以使用。
2. 使用者可以用黑色搖桿部份可以用來控制浮標的位置。
3. 紅色鍵代表滑鼠左鍵單擊(left click)，橙色鍵代表滑鼠右鍵單擊(right click)，黃色鍵代表滑鼠左鍵雙擊(double left click)，使用者按需要按合適的鍵。
4. 綠色鍵代表用作改變浮標移動速度，一路按鍵，浮標的速度一路有所改變，使用者自行選取適合自己的浮標移動速度。

### 注意事項：

1. 搖桿滑鼠 的體積比較大，重量亦比較一般的滑鼠為重，使用者必須安放在桌面上使用，使用時亦務必小心，以防撞倒手肘或碰跌落地，做成損害。